



Compruebe si hay signos de paro cardíaco repentino:

no responde no respira normalmente


1 TIRAR

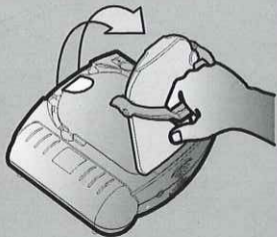

2 COLOCAR

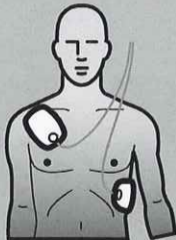


3 PULSAR

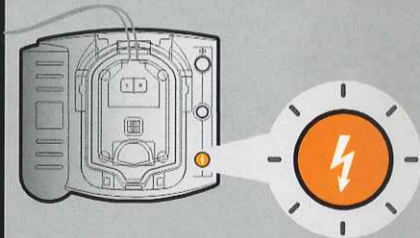

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


INSTRUCCIONES DETALLADA

Para iniciar: tire del mango.
Quite la cubierta de protección.

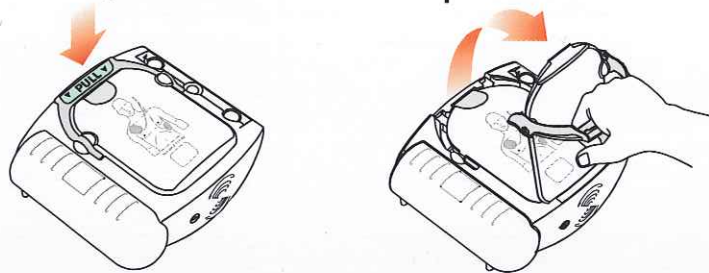


1

Retire la ropa que cubre el pecho del paciente.
Si es preciso, lave y seque la piel.

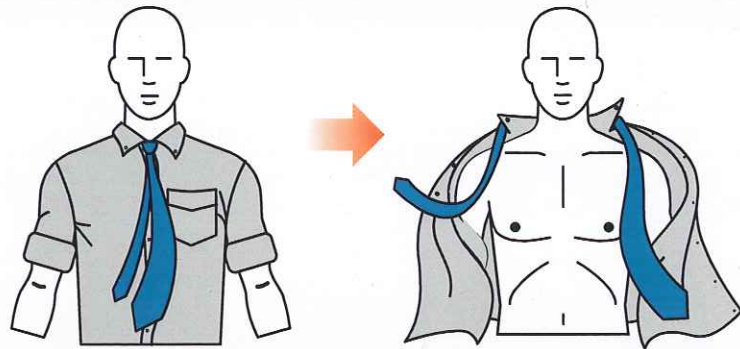




2

Despegue la película de sellado y extraiga los electrodos del cartucho.

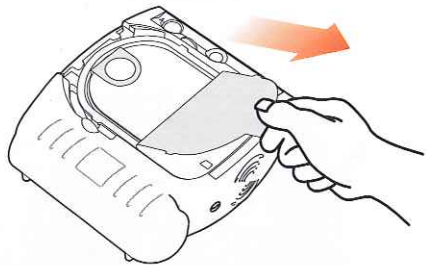


3

Despegue los electrodos de la funda de plástico amarilla.

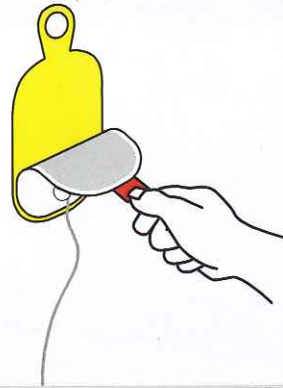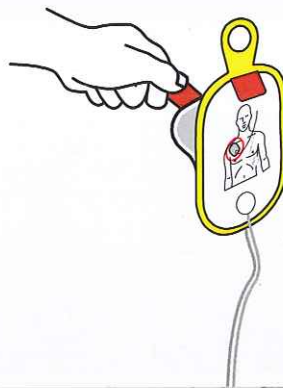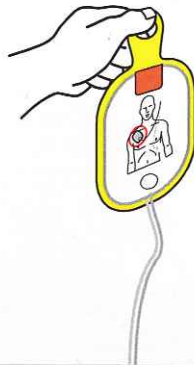

4

Colóque los electrodos exactamente como se muestra en la ilustración.

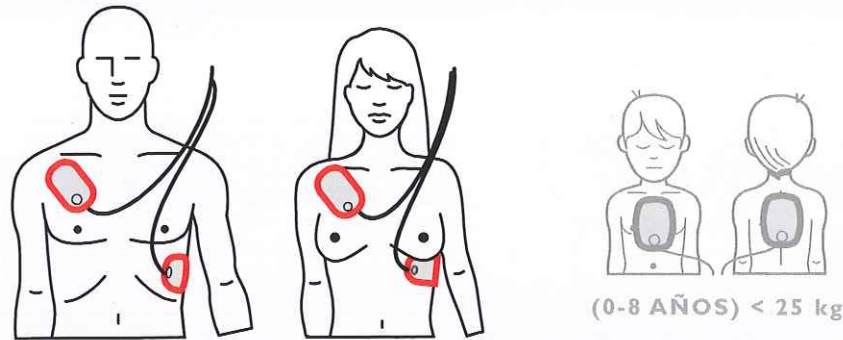

5


Analizando ... ¡No tocar al paciente!

Espera hasta que  deje de parpadear




6

Para aplicar una descarga: pulse el botón **NARANJA** destellante de descarga. No tocar al paciente.

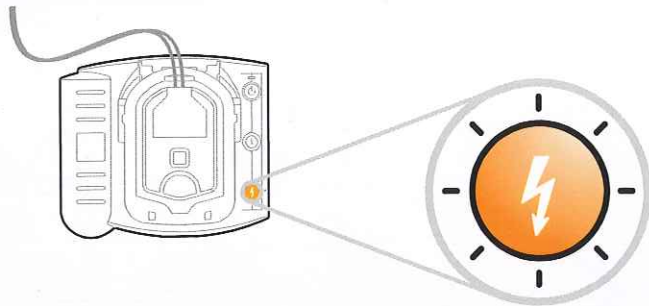

7

Para obtener ayuda con la RCP: presione el botón **AZUL** parpadeante.

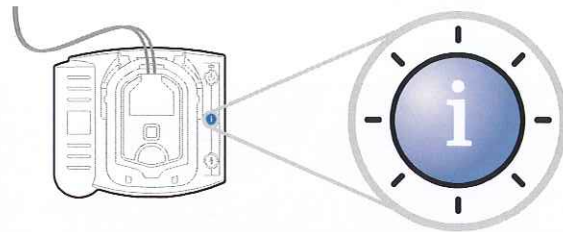

30 compresiones


• cierre la nariz con los dedos y incline la cabeza hacia atrás

• 2 respiraciones completas




8

Para encenderlo:
Presione el botón **VERDE** de encendido/apagado.

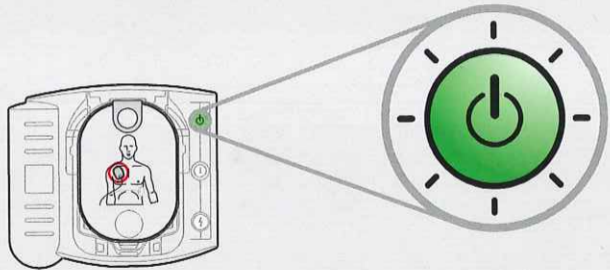

Para reemplazar el cartucho: deslice el pestillo.

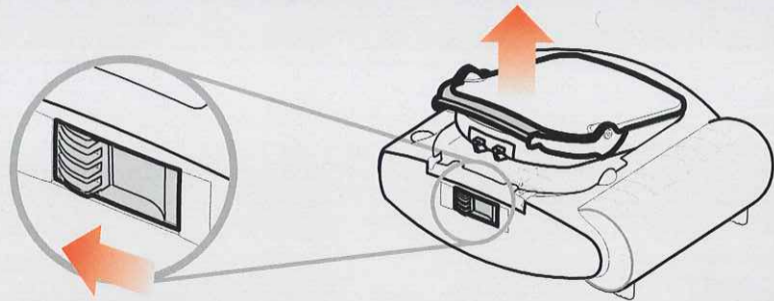

Impreso en EE.UU.

Philips Medical Systems
Bothell, WA 98021-8431, USA

Copyright © 2010
Philips Electronics North American Corp

453564141802 REV V

REF M5066-97804



453564141802

PHILIPS